

ThinPrep® 5000プロセッサAutoLoader

仕様

外形寸法	1370 (W) ×1450 (H) ×710 (D) mm
設置寸法	1600 (W) ×1900 (H) ×1220 (D) mm
質量	300kg
使用環境条件	温度：16 ～ 32℃
電源	湿度：20 ～ 80%RH (結露なきこと)
消費電力	入力：AC100-120V、47-63Hz 最大 980W

本体付属品

オペレータマニュアル、取扱説明書、カルーセル、染色ラック、固定液槽、廃液ボトル、電源コード、UPS（無停電電源装置）他

附属品／消耗品



婦人科用プレザーブサイト液
20mL



非婦人科用プレザーブサイト液
20mL



プレザーブサイト液ボトル
32oz (約 946mL)



サイトライト液ボトル
32oz (約 946mL)



サイトライト液遠心チューブ
30mL



トランスサイトフィルタ
①婦人科用
②非婦人科用
③FISH 対応尿用



スライドグラス
婦人科用
非婦人科用
FISH 対応尿用



Rovers (R) サーベックスブラシ



バイアル保管用トレイ
(4トレイパック)

Rovers サーベックスブラシ

届出番号	13B1X10179001005
販売名	Rovers サーベックスブラシ
製造販売元	ホロジックジャパン株式会社

取扱販売店名



ホロジックジャパン株式会社

製造販売業者：〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-25 日教販ビル TEL.03-5804-2340 (代) FAX.03-5804-2321

Hologic, ThinPrep, アプティマはHologic, Inc.およびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
ROVERSは、Rovers Medical Devices B.V.の登録商標です。 ©2017 Hologic, Inc. All rights reserved.



全自動液状化検体細胞診標本作製装置

ThinPrep® 5000 プロセッサ AutoLoader



標本作製の自動化を多検体処理に適応し、さらに進化させました。

- 検体と付属品をセットし、タッチパネルを操作するだけで準備完了。
- 一度スタートさせれば、約 6 時間で 160 検体の標本作製が自動で作製。
- 装置がバイアル ID を読み込み、自動でスライドグラスに ID を印字するため、確認作業が不要。^{※1}

多検体処理の要望に合わせたワークフローを提案

- 検体や付属品の追加供給も可能な為、より効率的なプロセスを実現します。
- 工程中はいつでも塗抹・固定された標本の取り出しが可能です。
- 婦人科、非婦人科それぞれの処理が検体トレイ毎に選択できます。

スライドグラスをセット

1 カセットに 100 枚ずつ、
合計 300 枚のセットが可能。
スライドグラスをカセットに移し換え
装置にセットします

Start

検体及び付属品を
装置にセット

フィルタをセット

1 トレイ 100 個ずつ、
合計 300 個のセットが可能。
フィルタトレイは、透明カバーを
外すだけでセットは終了します。

バイアルをセット

1 トレイに 40 検体ずつ、
合計 160 検体のセットが可能。
ID 付のバイアルを並べ
セットは完了します。

タッチパネルの
スタートを押す

Full auto

約6時間で160検体の
標本作製が可能。



その間、スタッフは他の業務に
従事することが可能で、作業時間の
有効活用にご貢献します。

Finish

塗抹・固定済みの標本を
取り出し染色へ

タッチパネルによる簡単操作

操作はパネル上のボタンをタッチするだけです。
工程中の状況がタイムリーに表示され確認することができます。

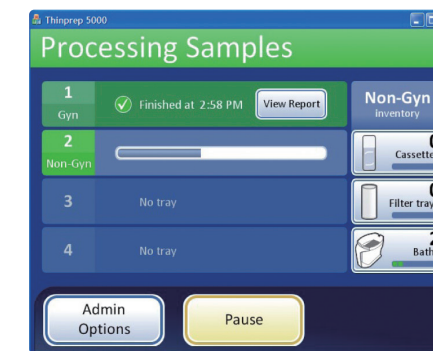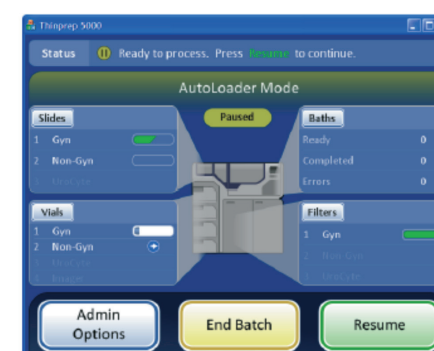

塗抹された
スライドグラスには
IDが自動で印字



※1 使用可能なバーコード規格については弊社担当者までお問い合わせください。